

# AED




Automatische Externe Defibrillator

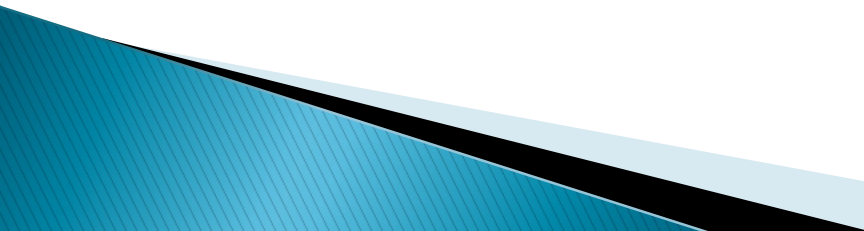
# Voor wie kan je de AED gebruiken?

- ▶ Het AED toestel is bestemd voor personen die een hartstilstand gehad hebben en:
  - Niet reageren
  - Niet of niet normaal ademen

# Wat doet een AED en wat niet?

- ▶ Het toestel zal enkel bij hartstilstand een schok geven als de ‘schoktoets’  ingedrukt wordt.
- ▶ Het toestel zal ‘GEEN schok’ geven als het slachtoffer nog wel een hartritme heeft!
- ▶ Iedereen kan dit toestel veilig gebruiken zonder gevaar om iets fout te doen!

# AED of reanimeren?

- ▶ Reanimeren is steeds de eerste handeling bij hartstilstand.
  - ▶ Wacht dus niet tot het toestel gebruiksklaar is om het slachtoffer te reanimeren.
  - ▶ Zolang je niet kan schokken moet je blijven reanimeren, tenzij het slachtoffer ondertussen teken van leven geeft.
- 

# AED procedure 1 / 2

- ▶ Druk op de aan/uit schakelaar



- ▶ Het toestel zegt je wat je moet doen!

- ▶ Sluit de padskabel aan



- ▶ Ontbloot de borstkas van het slachtoffer

- ▶ Breng de electrodepads aan



# AED procedure 2 / 2

- ▶ Als er een **schokbaar hartritme** wordt gedetecteerd, wordt het apparaat **automatisch geladen**
- ▶ Druk op de schok knop als daarom gevraagd wordt A square icon with a dark blue background. Inside is a brown triangle with a white lightning bolt and a white downward-pointing arrow.
- ▶ Zorg dat niemand het slachtoffer aanraakt en zeg: 'Iedereen los' voor je duwt
- ▶ 'Schok toegediend' wordt weergegeven en gesproken door het toestel